


নাড়িভুঁড়ি স্ক্রিনিং পরীক্ষা সামগ্রীর (কিট) সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী

আপনার প্রয়োজন হবে...

আপনার মল (হাণ্ড) নেওয়ার জন্য কিছু একটা,
যেমনঃ পুরাতন, পরিষ্কার কোন কোটা/পাত্র

পরীক্ষার সামগ্রী
অর্থাৎ কিট
(ভিতরে রয়েছে)

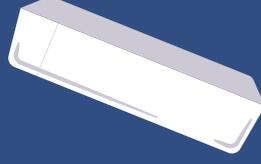

অথবা টয়লেট পেপার

কলম



খুবই গুরুত্বপূর্ণ

আপনি যেদিন নমুনা সংগ্রহ করবেন সে তারিখটি
পরীক্ষা সামগ্রী অর্থাৎ কিটের গায়ে লিখে রাখুন; তা
নাহলে আমরা হয়ত এটি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবো
না।

1




2



আপনার মল (হাণ্ড) সংগ্রহের জন্যে
একটি কোটা/পাত্র অথবা টয়লেট পেপার
টয়লেটের মধ্যে রাখুন।

3

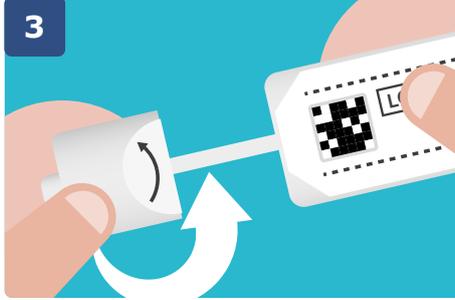


কার্টিটি অপসারণের জন্যে উল্টোদিকে
প্যাঁচ ঘুরিয়ে টিউবের ঢাকনাটি দিয়ে
খুলুন।

4



কার্টিটির শেষ প্রান্ত আপনার মলের মধ্যে
চুকান। কার্টিটির শেষ প্রান্তের কেবলমাত্র
দুটো খাঁজ (গ্রুভস্) পর্যন্ত অল্প পরিমাণে ভরুন
(উপরে যেভাবে দেখান হয়েছে)।

5

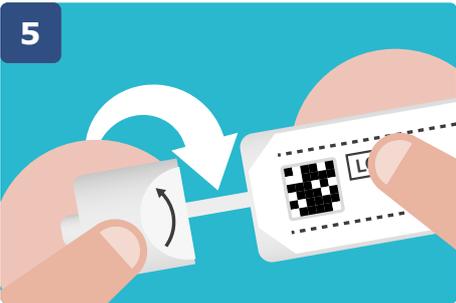

কার্টিটি টিউবের মধ্যে রাখুন। ঢাকনার
প্যাঁচ ঘুরিয়ে টিউবটি বন্ধ করে দিন।

6



আপনার হাতগুলো ধোত করতে ভুলবেন
না।

7



সম্পন্ন হবার পর, আপনার পরীক্ষা সামগ্রীটি
(কিট) প্রদত্ত পার্পল (রক্তবর্ণ) রঙের আগাম
ডাকমাশুল পরিশোধিত প্যাডওয়ালা খামে
ভরুন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সেটি ডাকযোগে
আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

