

Pokyny pre testovaciu súpravu na skrining hrubého čreva

Budete potrebovať....

Niečo na zachytenie stolice ako je stará čistá nádobka

Testovaciu súpravu (priložená)




alebo toaletný papier

Pero

Veľmi dôležité

Na testovaciu súpravu zapíšete dátum, kedy ste vzali vzorku, inak je možné, že vzorku nebudeme môcť otestovať.

1

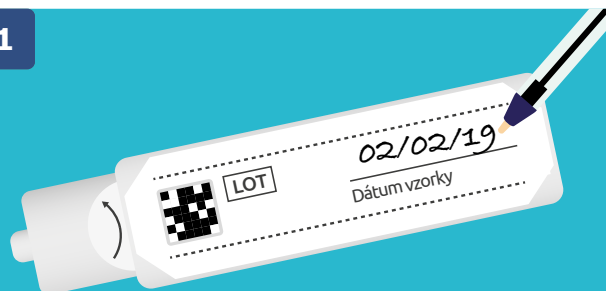


2



Do toaletnej misy vložte nádobku alebo toaletný papier.

3

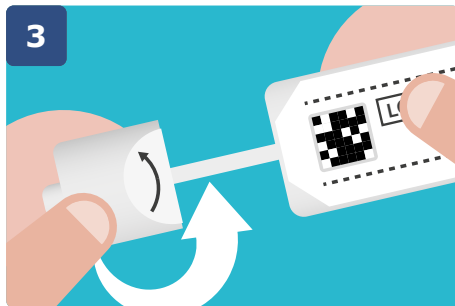


Odšrobujte uzáver skúmavky a vyberte tyčinku.

4



Ponorte koniec tyčinky do vzorky vašej stolice. Naplňte len dve malé drážky na konci tyčinky (ako je označené vyššie).

5

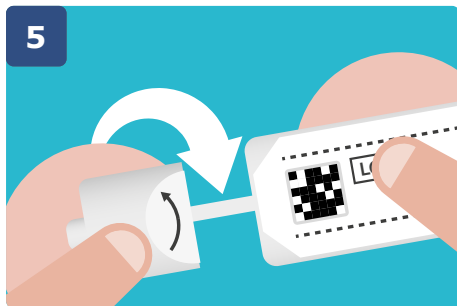

Vložte tyčinku späť do skúmavky. Skúmavku znovu zašrobujte uzáverom.

6



Nezabudnite si umyť ruky.

7



Po ukončení vložte testovaciu súpravu do poskytnutej predplatenej fialovej penovej obálky a čo najskôr ju zašlite poštou.

