


Istruzioni del kit per test di screening intestinale

Avrà bisogno....

Qualcosa dove mettere le feci, come un contenitore vecchio e pulito

Kit per test (incluso)

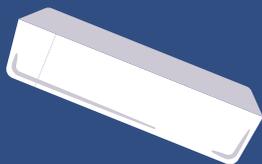

Penna

o carta igienica



Molto importante

Scrivere la data in cui si prende il campione o potremmo non essere in grado di testarlo.

1




2



Mettere il contenitore o la carta igienica nel gabinetto per raccogliere le feci.

3

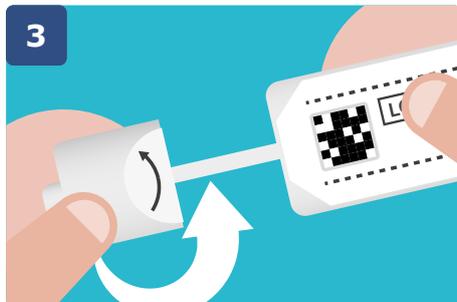


Svitare il coperchio del tubicino per rimuovere il bastoncino.

4



Immergere l'estremità del bastoncino nel campione delle feci. Riempire solamente le scanalature all'estremità del bastoncino (come mostrato sopra).

5

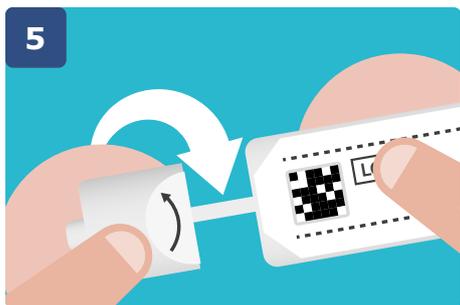

Rimettere il bastoncino nel tubicino. Chiudere il tubicino riavvitando il coperchio.

6



Ricordarsi di lavarsi le mani.

7



Una volta completato, mettere il kit del test nella busta viola imbottita prepagata e inviarla per posta al più presto possibile.

