

Instruções do kit de teste de rastreio do intestino

Vai precisar de....

Algo para conter as fezes, como um recipiente velho e limpo

Kit de teste (incluído)


Esferográfica

ou papel higiénico

Muito importante

Escreva a data da recolha da amostra no kit de teste ou poderemos não ter possibilidade de a testar.

1

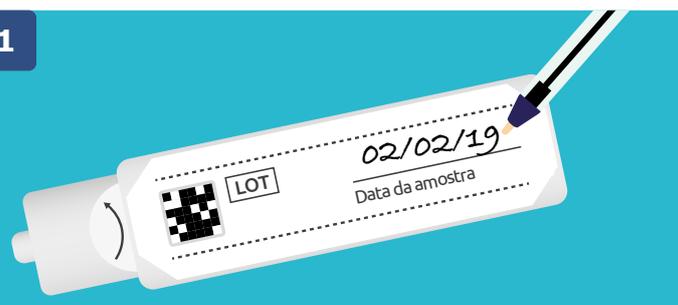


2



Coloque um recipiente ou papel higiénico na sanita para apanhar as suas fezes.

3

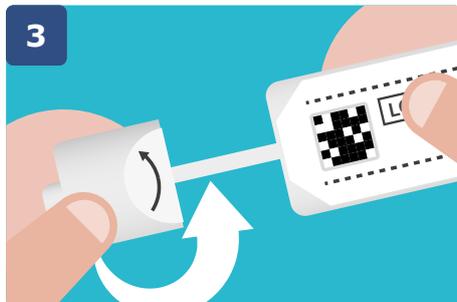


Desenrosque a tampa do tubo para remover a espátula.

4



Mergulhe a ponta da espátula na amostra das suas fezes. Encha apenas os dois sulcos pequenos na ponta da espátula (conforme mostrado acima).

5

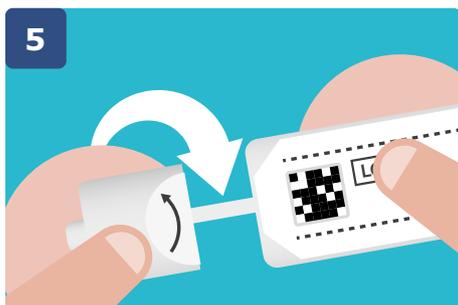

Volte a colocar a espátula no tubo. Feche o tubo enroscando a tampa novamente.

6



Não se esqueça de lavar as suas mãos.

7



Quando terminar, coloque o kit de teste no envelope acolchoado roxo com porte pago fornecido e envie-o o mais rapidamente possível.

